

Mascherina FFP2 NR

MODELLO CNJW-2020

Mascherina filtrante - 5 strati:

CARATTERISTICHE TECNICHE

La mascherina FFP2 NR modello **CNJW-2020** è un dispositivo di protezione individuale in grado di filtrare il 95% delle micro particelle sospese nell'aria. Protegge da batteri, virus, allergeni, nebbia, polveri, fumo, gas di scarico di auto ed altri agenti contaminanti. Plasmabile in 3 dimensioni, assicura un ottimo livello di aderenza e comfort, grazie anche al supporto nasale incluso.

Le Mascherine FFP2 vengono utilizzate frequentemente per prevenire contagi batterici e/o virali e per prevenire la respirazione di particelle dannose:

- *In ambito edile;*
- *Nell'industria chimica;*
- *Nell'industria sanitaria;*
- *Come dispositivo di protezione da allergeni.*

La mascherina è inoltre un'efficace protezione per qualsiasi condizione ambientale ed atmosferica. Può proteggere da nebbia, polveri, fumo, gas di scarico di auto ed altri inquinanti.

Dimensioni mascherina pieghevole: 16,2 X 10,5 cm.

Stringinaso ed elastici

Priva di lattice

Capacità filtrante: PFE \geq 95%

Classificazione: FFP2 NR

Normativa di riferimento: EN149:2001+A1:2009

Notified Body No: 1463

Contenuto di ciascuna scatola: 10 mascherine

Condizioni di conservazione: mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

Data di scadenza: 2 anni dalla data di produzione

MATERIALE:

I 5 strati della mascherina sono composti dai seguenti materiali:

- 28,5% tessuto melt-blown
- 43% tessuto non tessuto
- 28,5% cotone elettrostatico




Notified Body No: 1463



Mascherina FFP2 NR

MODELLO CNJW-2020

ISTRUZIONI PER L'USO

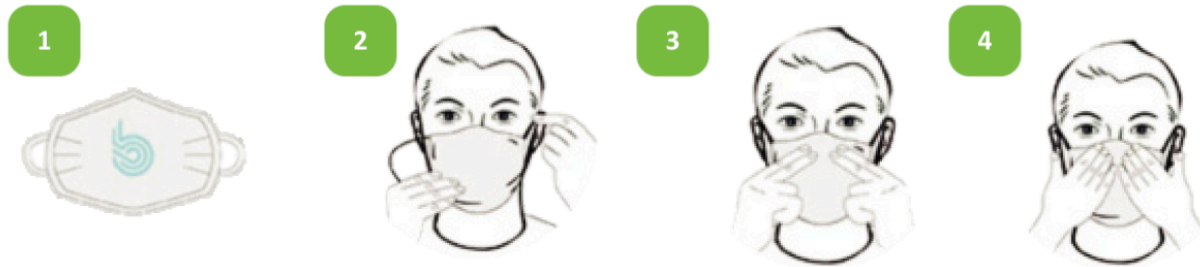

1. Aprire la maschera, apporre il supporto nasale in corrispondenza del ponte nasale
2. Appoggiare la maschera sul mento e tirare l'elastico alle orecchie, regolare fino ad un'indossatura confortevole.
3. Aggiustare la clip nasale in base alla forma del naso, utilizzando entrambe le mani
4. Regolare la maschera assicurandosi che si adatti perfettamente al viso.

INDICAZIONI

- Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l'uso per il corretto utilizzo della maschera e controllare il livello di aderenza al viso.
- Sostituire la maschera quando la resistenza respiratoria diventa eccessiva a causa del carico di polvere o di particelle o dopo un utilizzo al massimo di 8 ore.
- La maschera non è efficace per prevenire l'inhalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se indossata in un'area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
- Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
- Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di agenti tossici o contaminanti.
- Abbandonare immediatamente l'attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
 - Si incontrano difficoltà respiratorie;
 - Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
- Maschera monouso, non riutilizzare.
- Alterare, modificare, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l'azione filtrante.



Notified Body No: 1463



Mascherina FFP2 NR

MODELLO CNJW-2020

- Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l'esterno verso il centro.

IMPORTANTE

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.



Notified Body No: 1463

